

DiverseyTM

suma[®] Med Enzyme

Sairaalainstrumenttien pesuaine

Kuvaus tuotteesta

Neutraali, CE-merkitty proteaasientsyymiä sisältävä nestemäinen pesuaine sairaalainstrumenttien pesuun pehmeässä ja keskikovassa vedessä. Soveltuu käytettäväksi ultraäänipesulaitteissa ja endoskooppien pesukoneissa.

Ominaisuudet

- CE-merkitty Suma Med Enzyme on kehitetty erityisesti sairaalavälineiden pesuun.
- Tuote soveltuu käytettäväksi sekä pesu- ja desinfektioilaitteissa että käsin suoritettavassa pesussa.
- Sisältää valkuaista hajottavaa entsyymiä, joka varmistaa erinomaisen puhdistustuloksen pehmeässä, ja keskikovassa vedessä (2-8°dh).

Edut

- Irrottaa kiinni kuivuneen lian.
- Neutraali tuote on turvallinen käytössä.
- Soveltuu alkaliherkille materiaaleille (vaikuttavana aineena entsyymi).
- Tiivistetty tuote on taloudellinen käytössä.
- CE-merkitty.

Käyttöohje

Suma Med Enzyme voidaan annostella automaattisen annostelulaitteen avulla. Tarvittaessa myös käsiannostelu on mahdollista.

Annostus


Annostus 3 - 6 g/l. Annostus vaihtelee laitevalmistajakohtaisesti koneen käyttämän pesuveden määrän mukaan. Ultraäänipesukoneissa annostus 3 g/l yleensä riittää. Entsyymi hajoaa korkeissa lämpötiloissa ja paras pesutulos saadaan, kun lämpötila on alle 50°C. Käsimenetelmissä annostus 0,5 - 1 %.

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

Menetelmä

Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.

CE

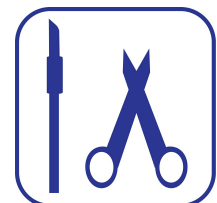



DiverseyTM

suma[®] Med Enzyme

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): ~ 7
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 7
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.13

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diverseym.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Suma Med Enzyme sopii useimmille sairaaloissa tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeen mukaisesti.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.

www.diverseym.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 24/03/2022 fi-FI (P01150)