

# Oxivir Excel Wipe

## Puhdistus- ja desinfektiopyyhe

### Kuvaus tuotteesta

Puhdistus- ja desinfektiopyyhe. Laajakirjainen. Teho viruksiin, bakteereihin, homeisiin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Kaksi vaihtoehtoista pehmytpakkausta: 30 kpl ja 100 kpl (pyyhkeiden koko 200 x 267 mm.). Valikoimassa myös kova 160 kpl pyyhkepakkaus, jossa läpinäkyvä kansi. Kannen alla sisäkansi, jossa kaksi suuaukkoa, jonka kautta voi ottaa yhden pyyhkeen tai samanaikaisesti useampia pyyhkeitä (pyyhkeen koko 150 x 170 mm). CE IIa-merkitty, PT2- ja PT4-hyväksyntä.

### Ominaisuudet

- Tehooa bakteereihin, viruksiin, homeisiin ja hiivoihin, CE IIa-merkitty.
- Hyvä pesuteho.
- Aktiiviatteet hajoavat vedeksi ja hapeksi, kerrostumaton.
- Säilyy avaamattomana 2 vuotta, avattuna 28 vrk.
- Kanisteripakkaus avattuna 3 kk. (kun kansi suljetaan huolellisesti).
- Soveltuu myös keittiö- ja elintarvikekohteisiin (PT4-hyväksyntä).

### Edut

- Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein.
- Tehooa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro-viruksiin.
- Tehooa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona-viruksiin.
- Desinfektion toteutumiseen vaadittavat kontaktiajat ovat tällä tuotteella lyhyitä, näin desinfektio ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista.
- Erinomainen puhdistuskyky.
- Turvallinen käyttää. Ei ärsytä silmiä eikä ihoa.
- AHP-koostumus on turvallinen pinnoille.
- Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, tehosastot ja potilashuoneet.




### Käyttöohje

Poista näkyvä lika. Avaa pyyhkepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi. Pyyhi pinta ja anna kuivua. Ota uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta on silminnähtävien likainen tai kun siirryt seuraavaan puhdistuskohteeseen.

### Annostus

Käyttövalmis

*\*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

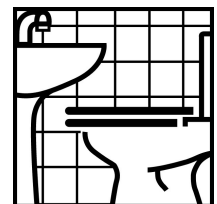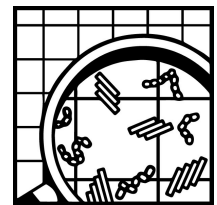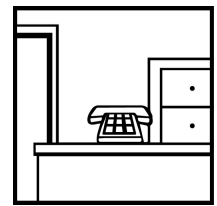

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a blue oval shape with a white leaf-like graphic to the right. The letters "TM" are positioned at the top right of the oval.

Diversey

# Oxivir Excel Wipe

## Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2  
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 2  
Suhteellinen tiheys (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaaliuotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

**Säilyvyys:** Säilyy avaamattomana 2 vuotta, avattuna 28 vrk.

**Huomioitavaa:** Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia aineita. Esim. marmori. Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä pitkäaikaisessa käytössä.

## Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIA -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme

[www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00249)