

Diversey™

# Oxivir Excel Foam

## Desinfiiva puhdistusaine

### Kuvaus tuotteesta

Oxivir Excel Foam on kehitetty laajakirjoiseen, desinfiivaan puhdistukseen. Tuotteen vaikutusaika on lyhyt ja sen teho perustuu patentoituun AHP-teknologiaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettä sietäville pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille (CEIIa). Tuotteella on PT2- ja PT4 hyväksyntä.

### Ominaisuudet

- Tehoa viruksiin, bakteereihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti.
- Säilyvyys käyttöönotettuna / avamattomana 2 vuotta valmistuspäivästä.
- Puhdistaa ja desinfiioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaika.
- Soveltuu laajalti erilaisiin kohteisiin terveydenhuollon vaativista olosuhteista keittiö- ja mm. kosteiden tilojen desinfiivaan puhdistukseen.

### Edut

- Turvallinen käyttäjille ja pinnoille.
- Erinomainen puhdistuskyky.
- Nopea desinfiointiteho - desinfiointi ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista.
- Tuotteen teho todistettu EN-testein.
- Tehoa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro-viruksiin. Tehoa myös vaipallisiin viruksiin kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona-viruksiin.
- Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.
- Soveltuu myös aroille tekstiileille, Wool Safe-hyväksyntä.




### Käyttöohje

Pyyhi pinta vaahtoon kostutetulla siivouspyyhkeellä tai annostelee tuotetta suoraan pinnalle ja pyyhi. Pyyhi pinta ja anna kuivua.

### Annostus

Käyttövalmis

*\*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

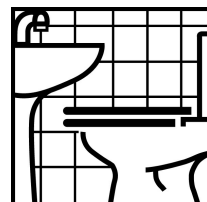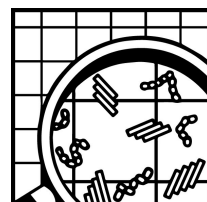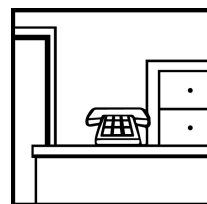

© A.I.S.E



# Oxivir Excel Foam

## Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2  
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 2  
Suhteellinen tiheys (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

**Säilyvyys:** 2 vuotta valmistuspäivästä käyttöönottettuna / avamattomana

**Huomioitavaa:** Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia aineita. Esim. marmori. Käytä suojakäsineitä.

## Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIA -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

[www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00023)